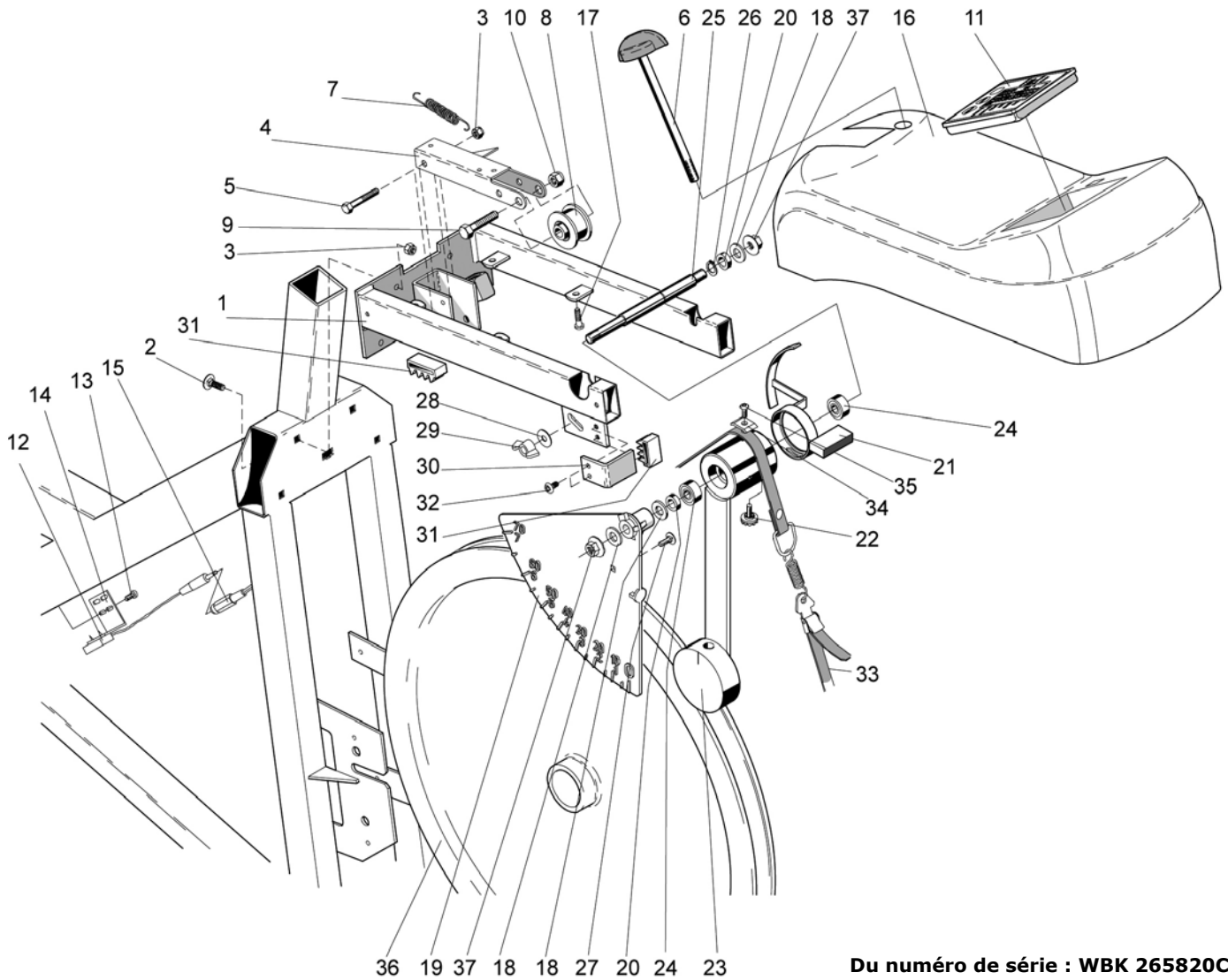

Du numéro de série : WBK 265820C

Num.	Qté	Réf :	Description	Num.	Qté	Réf :	Description
1	1	9301-15	Tube de support avant	20	1	9300-115	Douille pour tige de selle
2	1	9301-16	Tube de support, arrière	21	1	9300-123	Couvercle supérieur
3	4	9328-51	Embout en plastique, bleu	22	1	9300-280	Guidon complet
4	4	9328-26	Pied en caoutchouc	23	1	9100-180	-Lever M10
5	1	9328-37	Roulettes de transport (deux)	24	1	9300-291	-Cale de serrage
6	4	5845	Écrou de verrouillage M8	25	1	9126-72	Poignées (deux)
7	2	9300-12	Vis MVBF M8 x 16 mm	26	1	9300-61	Couvercle du cadre, gauche
8	1	9300-55	Chaîne 1/2" x 1/8", 116 l	27	1	9300-60	Couvercle du cadre, droite
9	1	9326-164	Aimant	28	4	5673-9	Vis de montage LKT-TT 5 x 12 mm
10	2	8523-2	Couvercle anti-poussière	29	10	9306-12	Bouchon en plastique
11	2	8523-115	Vis M6S 8,8 M8 x 20 FZB	30	1	9301-5	Cadre
12	1	9300-430	Ensemble de manivelle en acier complet	31	1	9300-24	Ensemble de suspension de la roue
13	1	9300-220	Pédale (la paire)	32	1	9000-12	-Tendeur de chaîne (deux)
14	1	9300-207	Sangle de pédale (deux)	33	1	9106-13	-Pignon
15	1	8966-175	Roulement de l'axe de pédalier, complet	34	1	9106-14	-Connexion
16	1	9300-138	Tige de selle	35	3	91001-6	-Roulement 6001-2z
17	1	9300-133	Vis de blocage, complète	36	1	9300-18	-Essieu
18	1	9300-134	-Rondelle de pression		1	9328-190	Ceinture thoracique
19	1	4994-5	Selle		1	9000-211	Poids de calibration, 4 kg (accessoires)



Du numéro de série : WBK 265820C

Num.	Qté	Réf :	Description	Num.	Qté	Réf :	Description
1	1	9300-30	Cadre de l'équipement	18	3	5866	Rondelle
2	4	9300-21	Vis MVBF 6 x 16 mm		1	9300-36	Panneau du compteur, complet
	4	5863	Rondelle	19	1	9339-100	-Panneau du compteur
3	5	5843-9	Écrou M6	20	2	9000-17	-Entretoise
4	1	9300-22	Levier de tension	21	1	9300-93	-Lecteur du compteur 7 kp
5	1	14333-9	Vis M6 x 45 mm	22	1	9000-103	-Vis
6	1	9300-25	Vis de tension M8, complète	23	1	9300-88	-Levier du poids
7	1	9100-20	Ressort	24	2	19001-6	-Roulement 6001-2z
8	1	9100-26	Cylindre de tension complet	25	1	9300-86	-Essieu
9	1	14358	Vis M8 x 40 mm	26	1	9300-87	-Bague de verrouillage SgA 12
10	1	5844	Écrou de verrouillage M8	27	1	9339-21	Vis
11	1	9300-170	Compteur digital	28	1	5862	Rondelle
	2	2142	Pile 14 x 50 mm	29	1	9000-102	Écrou à oreilles
12	1	9326-162	Capteur de manivelle avec câble	30	1	9300-94	Butée
	2	9103-40	Vis pour capteur de manivelle	31	2	9300-99	Butée en plastique
13	1	9126-75	Vis RXS B8 x 9,5 FZB	32	1	5671-9	Vis M5 x 10 mm
14	1	9326-166	Support du capteur	33	1	9103-62	Courroie de freinage complète
15	1	9326-263	Câble 620 mm	34	1	9300-92	Rondelle
	5	9300-66	Support de câble	35	1	5675-9	Vis de montage
16	1	9300-142	Couvercle des instruments	36	1	9300-3	Volant
17	4	5768	Vis de montage pour couvercle	37	2	5799	Écrou